

平成 26 年 9 月 10 日

高齢者・介護用品で重大事故発生のおそれ！ ～回収・修理や注意の呼び掛けに対応してください～

高齢者の皆様が使用することが多い製品や介護用品についても、回収や修理等が必要な製品をそのまま使い続けると重大な事故を引き起こすおそれがあり、大変危険なものがあります。また、安全に使用するための注意が呼び掛けられている製品もあります。

現在、事業者が回収中又は注意を呼び掛けている高齢者の皆様が使う製品等について、危険性や注意事項、対応方法をまとめましたので、身の回りにこうした製品がないか再度確認してください。回収、修理等の対象製品をお持ちの場合は、直ちに使用を中止し製造事業者等に連絡してください。

事故防止のための注意喚起文もよく御覧ください。特に、手すり等の「隙間」には、頭部や体の一部が挟まり、負傷や死亡する等思わぬ危険が潜んでいます。注意喚起に従い、隙間を埋める等の対策をとってください。高齢者の方の中には、安全な使用のための情報に気付きにくい、自身での対処が難しい場合もありますので、周囲の方が気を配っていただくようお願いします。

また、高齢者の事故の中には、操作ミスや設置、使用方法の誤りによるものも見受けられます。介護をされる方も含めて、改めて使用上の注意事項を確認し、適切な取扱いをするよう御留意ください。

※ 消費者庁ウェブサイトのリコール情報サイト (<http://www.recall.go.jp/>) に掲載されたもののうち、高齢者・介護用品に関する事故報告があった製品、注意を要する製品をまとめています。

1. 介護用ベッド

ベッドの分割式フレームの接続部品の破損による重大事故が平成21年以降、2件発生しており、対策部品等の無償提供が行われています。

また、手元スイッチ内の抵抗不良による不具合や木製部分の強度不足により破損するおそれがあることも報告されています。補強金具の提供や部品の交換が行われていますので、事業者に連絡してください。

<事件事例>

介護ベッドに設置された手すりに掴まって上半身を起こそうとしたところ、ベッドの頭側が下方向に傾き、バランスを崩して手すりに胸部を打ち、負傷した。
(事故発生年月：平成25年6月、埼玉県)

2. ベッド用サイドレール／グリップ

転落予防や手すりとして介護用ベッドに取り付けて使用するサイドレール／グリップの隙間に、首や手などが入り込む事故が起きています。

製品に起因しないものも含め、平成19年以降、67件の重大事故（うち死亡事故35件）が報告されています。介護を行っている方は、隙間を塞ぐ対策を確実にとってください。事業者をはじめ、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、サイドレール等の事故防止対策について注意喚起を行っていますので御参照ください。

<事故事例>

- ① 介護ベッド用手すりの隙間に使用者の左腕が挟まり、負傷した。
（事故発生年月：平成24年4月、埼玉県、90歳代）
- ② 使用者が、手すりとマットレスの隙間に頭部が入り込んだ状態で発見され、死亡した。
（事故発生年月：平成25年1月、石川県、80歳代）

3. 手すり

床置きの手すりの隙間に頭部等が入り込んだ状態での重大事故が、平成23年度に2件発生しています。手すりの枠内を狭めるサポートベルトが配布されています。また、手すりをベッドサイドに置く場合は、ベッドとの間に隙間ができないようにすることが必要です。ホームページやパンフレットに設置や使用上の注意も掲載されていますので、確認してください。

<事故事例>

使用者が手すり（床置き式）のパイプ間に首が挟まった状態で発見され、死亡した。
（事故発生年月：平成23年11月、奈良県、80歳代）

4. ポータブルトイレ

ひじ掛けと背もたれの隙間に首を挟むことによる重大事故が1件発生しています。隙間のない製品への無償交換が行われていますので、事業者へ御連絡ください。

<事故事例>

施設でポータブルトイレに向かってうつ伏せ状態で倒れている使用者が発見され、死亡が確認された。当該製品の肘掛けと背もたれの隙間に首を挟んだものと考えられる。
（事故発生年月：平成25年9月、新潟県、50歳代）

5. 手指保護具（口腔用）

内側から生じたクラック（ひび割れ）により製品が破断したことによる重大事故が1件発生しています。製品の外観の確認や交換の目安等使用にあたっての注意表示がされていますので、取扱説明書等をよくお読みください。

<事故事例>

施設内で製品を使用中、当該製品の一部が破断して患者の口腔から体内に入り、病院に搬送後、窒息による死亡が確認された。

（事故発生年月：平成24年4月、大阪府）

6. 車いす

車いすの手押しハンドルのパイプと本体パイプとの接続部分が外れるという不具合が発生しています。溶接不良による破損と思われ、事業者の無償回収が行われています。

7. 歩行補助車

歩行補助車の車輪が外れて転倒する事故が発生し、無償補修が行われています。

<事故事例>

使用中の歩行補助車のキャスター（右前輪）が脱落してバランスを崩し、転倒して右腕、右側頭部に打撲を負った。（事故発生年月：平成21年1月）

8. 電動車いす

スイッチの誤作動等による事故が発生しています。また、構造上の不具合による耐久性の低下、製造不良によりシートやアッパーアーム（タイヤと車体を繋ぐ部品の一部）が外れるおそれ等により部品交換や点検修理が行われています。

<事故事例>

電動車いすで登坂路を走行中、「ガクン」という音がして車体が後退し始めたためハンドル操作で路肩に寄せたところ、転倒し、軽傷を負った。

（事故発生年月：平成22年10月）

電動車いすについては、運転操作の誤りによる転落等製品に起因しないと思われる事故が多発しています。平成19年以降、77件の重大事故（うち死亡事故41件）が報告されており、消費者庁でも平成22年9月、平成23年9月及び平成24年11月に注意喚起を行っています。転落の危険のある場所には近寄らない、急な坂道の通行は避ける等事故を防ぐための注意を守りましょう。

電動車いすを安全に利用するために、製造事業者や福祉関連団体が開催する安全運転指導講習会に参加しましょう。電動車いす安全普及協会では、ホームページ上に注意点を紹介する動画を掲載する等事故防止のための取組を行っています。参考にしてください。

9. マッサージ器

誤った使い方（マッサージ器の布カバーを取り外したり、破れた状態での使用）による死亡事故が、平成11年以降6件発生しています。事業者は、使用の中止又は適正な使用を呼び掛けています。

<事故事例>

家庭用ローラー式電気マッサージ器を、ローラー一部についている布カバーを取り外した状態で使用し、衣服がローラー一部に巻き込まれ窒息死した。

（事故発生年月：平成26年5月、山梨県、80歳代）

<参考>

○消費者庁からの注意喚起

「介護ベッドの手すり等による死亡事故が発生しています！」（平成24年11月2日）

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf

「医療・介護ベッド使用にかかる注意喚起の周知度調査の結果及び対策について」（平成24年11月2日）

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_2.pdf

「介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る注意喚起について」（平成22年10月1日）

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf

「電動車いすを使用中に死亡事故が発生しています！」（平成24年11月27日）

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121127kouhyou_2.pdf

「電動車いす(ハンドル形)の使用に関する注意喚起について」（平成23年9月22日）

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110922kouhyou_4.pdf

「電動車いす(ハンドル形)の使用に関する注意喚起について」（平成22年9月8日）

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100908kouhyou_3.pdf

【本件に関する問合せ先】

消費者庁消費者安全課 河岡、中川、蕪塚

TEL : 03(3507)9137 (直通)

FAX : 03(3507)9290

消費者庁ウェブサイト : <http://www.caa.go.jp/>

対応していますか？ 回収・修理や注意を呼び掛けている高齢者・介護用品

● マッサージ器

9-(1) 株式会社の場電機製作所

9-(2) 株式会社フジ医療器

● 介護用ベッド

1-(1) パラマウントベッド株式会社

1-(2) 株式会社プラッツ

1-(3) 株式会社プラッツ

● ベッド用サイドレール/グリップ

2 医療・介護ベッド安全普及協議会・会員7社

① アイシン精機株式会社
② シーホネンス株式会社
③ パラマウントベッド株式会社
④ 株式会社プラッツ
⑤ フランスベッド株式会社
⑥ 株式会社モルテン
⑦ 株式会社ランダルコーポレーション

● 電動車いす

8-(1) スズキ株式会社(製造・販売)
パナソニックサイクルテック株式会社
(旧ナショナル自転車工業株式会社・販売)

8-(2) スズキ株式会社(製造・販売)
シーケー販売株式会社(販売)

8-(3) 株式会社クボタ

8-(4) 株式会社クボタ

8-(5) トヨタ車体株式会社
(旧 アラク株式会社)

8-(6) トヨタ車体株式会社
(旧 アラク株式会社)

8-(7) トヨタ車体株式会社
(旧 アラク株式会社)

8-(8) トヨタ車体株式会社
(旧 アラク株式会社)

● 歩行補助車

7 アロン化成株式会社

● 車いす

6 株式会社幸和製作所

● 手指保護具 (口腔用)

5 株式会社オーラルケア

● ポータブルトイレ

4 積水化学工業株式会社

● 手すり

3 矢崎化工株式会社

(注) 写真は一例です。掲載以外の外観・型式の製品もありますので、詳細は当該事業者の連絡窓口で御確認ください。

<消費者庁リコールサイトについて>

回収・無償修理等
リコール情報サイト

<http://www.recall.go.jp/>



- リコール製品に関する問合せ先等の情報は、消費者庁ウェブサイトのリコール情報サイトからも入手できますので御確認ください。
- 製造メーカー、製品カテゴリー、商品名、型番等のキーワードにより検索することができます。

<関連機関・団体>

- 医療・介護ベッド安全普及協議会 03-3648-5510
- 日本福祉用具・生活支援用具協議会 03-3437-2623
- 一般社団法人日本福祉用具供給協会 03-6721-5222
- 電動車いす安全普及協会 053-440-2953

高齢者・介護用品の回収修理中・注意喚起中の機種・型式と問合せ先一覧

平成 26 年 9 月 10 日

| 品目 | No. | 事業者 | 危険性（事業者対応日） | 対象機種・型番 | 対応方法 | 問合せ先 |
|-----------------|-------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 介護用ベッド | 1-(1) | パラマウントベッド株式会社 | <転落・転倒のおそれ> (平成18年3月1日) ベッドの端に座るなど荷重が加わった場合、ベッド台座部と頭側ベッド枠を接続する箇所の樹脂製部品が破損し、ベッドが傾き転倒するおそれが判明しました。 | 在宅用電動介護用ベッド「楽匠」 KQ-86□□□ らくらくモーションシリーズ(3モーター) KQ-83□□□ 3モーターシリーズ KQ-82□□□ 2モーターシリーズ ※□□□には英数字。 ・製造期間:平成15年11月～平成18年5月 | 対策部品等無償提供 | パラテクノコールセンター 0120-54-8639 平日:8時～19時 土・日・祝日(年始を除く):9時～17時20分 |
| | 1-(2) | 株式会社ブラッツ | <予期せず作動するおそれ> (平成23年9月1日) 一部の商品に手元スイッチ内の抵抗不良により、ベッドが自然に下がる、又は脚が自然に上がるという不具合があることが判明しました。 | ●介護保険レンタル対応ベッド「ミオレット」シリーズの3モーター仕様 PZB-M3RJ、PZB-M3SJ (対象ロット番号:LI1011～LI1106) ※手元スイッチの裏に表示。 ●施設用低床電動ベッド「アルティレット」シリーズの3モーター仕様 PKB-AS3FA、PKB-AS3FAC、PKB-AS3FB、PKB-AS3FBC (対象ロット番号:LI1011～LI1106) ※手元スイッチの裏に表示。 ・販売期間:平成23年1月～平成23年7月 | 無償部品交換 | 0120-77-3433 9時～17時 (土・日・祝日を除く) |
| | 1-(3) | | <使用中に破損のおそれ> (平成25年1月15日) 木製ヘッドボード、フットボードが、強度不足により使用中に破損するおそれがあります。 | 「ミオレット・フォーユー」 ※()は、対象ロット番号。 P100-FJ2 (フラットヘッドボード木部)(MS120305500、MS120405500) P100-FK1 (フラットフットボード木部)(MS120305600、MS120405600) P100-FJ3 (宮付ヘッドボード木部)(MS120305700、MS120405700) | 無償部品交換 | 0120-937-540 9時～17時30分 (土・日・祝日を除く) |
| ベッド用サイドレール／グリップ | 2 | 医療・介護ベッド安全普及協議会 | <頭・首等が挟まるおそれ> (平成20年3月29日) 手すりやサイドレールの間に頭、首、手足等を挟みこむ事故を起こすおそれがあります。 | ●医療・介護ベッド安全普及協議会会員7社のベッド用サイドレール及び手すり ①アイシン精機株式会社 ⑤フランスベッド株式会社 ②シーホネス株式会社 ⑥株式会社モルテン ③パラマウントベッド株式会社 ⑦株式会社ランダルコーポレーション ④株式会社ブラッツ | 注意喚起 サイドレール・グリップの隙間等への対策 | 03-3648-5510 ①0566-24-8640 ②0120-20-1001 ③0120-54-8639 ④0120-77-3433 ⑤0120-39-2824 ⑥03-3625-8510 ⑦048-475-3662 |
| 手すり | 3 | 矢崎化工株式会社 | <頭・首等が挟まるおそれ> (平成24年4月16日) 上段手すりと下段手すりの間に頭部等が入り込み事故が発生するおそれがあります。 | 「たちあつぷ」 CKA-03 FB-03 CGA-3 CKA-01 CKA-0 FB-02 CKA-02T1 CKA-02T2 CKA-02T3 CKA-04 CKA-04T1 CKA-04T2 FB-04 | 注意喚起 無償提供サポートベルト活用 | 0120-054-280 9時～16時 (土・日・一部の祝日を除く) |
| ポータブルトイレ | 4 | 積水化学工業株式会社 | <頭・首等が挟まるおそれ> (平成14年5月1日) 転倒などの際に肘掛けと背もたれの隙間に体の一部(首や手)を挟むおそれがあります。 | 「ポータブルトイレ座楽背もたれ型」 SPTSD SPTSB SPTH SPTSP SPTSPS APTSP SPTSPMB ・販売時期:平成8年10月～平成14年6月 | 無償交換 | 0120-011-578 9時～19時 (土・日・祝日・特定休日を除く) |
| 手指保護具(口腔用) | 5 | 株式会社オーラルケア | <窒息するおそれ> (平成24年6月4日) 何らかの原因で内側からクラックが生じ、継続的な使用によって製品が破断して患者の口腔から体内に入り、窒息するおそれがあります。 | 「ゆびガード」 | 注意喚起 正しい使い方、破損時対処方法等 | 0120-500-418 9時～18時 (土・日・祝日を除く) |
| 車いす | 6 | 株式会社幸和製作所 | <走行に支障を来すおそれ> (平成24年1月13日) 手押しハンドルの溶接強度不足により手押しハンドル部の溶接部が外れるおそれがあります。 | 「アルミ製ミドル介助車」 BH02 (対象ロット:CHI0001～0185、CHJ0001～0400、CHJ0410～0823) ※押し手側から見て、手押しハンドルの下に表示。 | 無償回収 返金又は代替品へ交換 | 0120-508-058 10時～17時 (土・日・祝日を除く) |
| 歩行補助車 | 7 | アロン化成株式会社 | <転落・転倒のおそれ> (平成21年1月29日) 車輪が外れて転倒するおそれがあります。 | サンフィールⅡ:(バータイプ)ブルー(バータイプ)レッド サンフィールS:(ショッピング)青チェック サンフィール:(ショッピング)青チェック(ショッピング)赤チェック サンフィール:(ウオーキング)青チェック ※対象ロット番号は、事業者にてご確認ください。 ・製造期間:平成20年8月～平成20年11月 | 無償補修 | お客様相談室 0120-86-7735 9時～17時 (12時から13時・土・日・祝日を除く) |
| 電動車いす | 8-(1) | スズキ株式会社(製造・販売) パナソニックサイクルテック株式会社(旧ナショナル自転車工業株式会社・販売) | <誤作動による事故のおそれ> (平成23年9月6日) 前後進切替スイッチのレバーに組付けられたネオジム磁石の錆により、当該スイッチが後進の位置を検出できなくなり、レバーを後進に切り替えても後進警告アラームが鳴らず、アクセル操作をすると前進するおそれがあります。 | ●スズキ株式会社「スズキ セニアカー ET-4A/ET-4C」 ET-4A I型:ET4A(ET4A-100018～ET4A-118177) ET-4A II型:ET4A(ET4A-200007～ET4A-204234) ET-4C I型:ET4C(ET4C-100006～ET4C-100549) ・製造期間:平成11年2月～平成13年8月 ●パナソニックサイクルテック株式会社(旧ナショナル自転車工業株式会社) 「リラルカート BH-RC41」 RC41(RC41-100011～RC41-100110) ・製造期間:平成13年5月～平成13年8月 ※()は製造番号 | 無償部品交換 | 0120-402-253 9時～12時 13時～17時 0120-781-603 9時～20時 (年中無休) |
| | 8-(2) | スズキ株式会社(製造・販売) シーケー販売株式会社(販売) | <走行に支障を来すおそれ> (平成20年4月11日) 構造上の不具合により、モーターの耐久性が低下するおそれがあります。 | ●スズキセニアカー(ET-4D/ET-4E/ET-4F/ET-4FS) ET-4D(I型 II型 III型) ET-4E(I型 II型 III型) ET-4F(I型 II型 III型) ET-4FS III型 ・製造期間:平成14年9月～平成19年5月 ●タウンパートナー(EK40S・EK40D) EK40D I型 EK40D II型 EK40S I型 ・製造期間:平成15年2月～平成16年9月 ※対象は、特定の車体番号のものです。事業者にてご確認ください。 | 無償部品交換 | 0120-402-219 9時～12時 13時～17時 0120-989-615 9時～17時 (土・日・祝日を除く) |
| | 8-(3) | 株式会社クボタ | <転落・転倒のおそれ> (平成16年6月9日) シートサポートの製造不良により、シートが外れ落ちるおそれがあります。 | 「ラクター」 EV21D(10990～12543) EV21Dイ(10022～10050) EV21L(10316～11565) EV21D4(10001～11684) EV21L4(10001～10687) ※型式(EV21**)と製作番号(SERIAL NO)はシート右下のバーコードラベルに表示、()は製作番号。 | 無償部品交換 | 06-6648-2508 8時30分～17時 (土・日・祝日を除く) |
| | 8-(4) | | <転落・転倒のおそれ> (平成18年2月23日) 前輪アッパーアーム取付部の製造不良により、アッパーアームが外れるおそれがあります。 | 「ラクロード」 EW40(50001～50465) ※()は製造番号 ・製造期間:平成17年3月～平成17年9月 | 無償点検修理 | |
| | 8-(5) | トヨタ車体株式会社(旧アラコ株式会社) | <走行に支障を来すおそれ> (平成20年10月30日) 前輪緩衝装置のボールジョイントが保護部品の破損で摩耗し、段差乗り上げ等の過大な力が加わるとボールジョイントが外れ、円滑な運転操作がしにくくなるおそれがあります。 | 「エブリデー タイプ4」 AT06L-PNBR(NB0009001～NB0211057) ※()は製造番号 ・製造期間:平成12年9月～平成14年11月 | 無償部品交換 | 特装・福祉センター 0120-100-804 9時～17時 (土・日・祝日を除く) |
| | 8-(6) | | <転落・転倒のおそれ> (平成16年9月1日) 前輪用アッパーアーム溶接部の強度不足により、前輪に大きい負荷を加えると折損に至るおそれがあります。 | 「エブリデー タイプ4」 AT07L-PNDR(ND0212001～ND0407066) ※()は製造番号 ・製造期間:平成14年12月～平成16年8月 | 無償点検部品交換 | |
| | 8-(7) | | <転落・転倒のおそれ> (平成18年2月23日) 前輪用アッパーアーム溶接部の強度不足により、前輪に大きい負荷を加えると折損に至るおそれがあります。 | 「エブリデー」 AT08L-PNCR(NC0408001～NC0510017) ※()は製造番号 ・製造期間:平成16年9月～平成17年10月 | 無償点検修理 | |
| | 8-(8) | | <誤作動による事故のおそれ> (平成20年10月30日) 動力伝達装置のクラッチレバーに路面突起物が干渉すると、モーターとの連結が解除され駆動力を失い走行不能、坂道で惰性走行に至るおそれがあります。 | 「エブリデー」 AK01E-P ・製造期間:平成9年6月～平成10年11月 | 無償部品交換 | |
| マッサージ器 | 9-(1) | 株式会社現場電機製作所 | <窒息するおそれ> (平成26年6月23日) 布カバーを装着しない状態で使用した場合、衣服が巻き込まれ窒息するおそれがあります。 | 「アルビシェイプアップローラー」 「シェイプアップローラーⅡ」 SR-5118 | 注意喚起 使用の中止 | 0120-01-2251 9時～17時 (土・日・祝日を除く) |
| | 9-(2) | 株式会社フジ医療器 | <窒息するおそれ> (平成22年2月1日) 布カバーを切り取ったり破れた状態で使用した場合、衣服が巻き込まれ窒息するおそれがあります。 | 「もみ太くん」MK-1 「ハンディーマッサージャー(愛称:もみ太くん)」GM-2 ※販売名は異なりますが同一製品です。 | 注意喚起 適正な使用方法 | お客様相談窓口 0120-027-612 9時～17時30分(土・日・祝日・年末年始を除く) |

高齢者・介護用品の回収修理中・注意喚起中の事業者ホームページ (URL)

| 品目 | No. | 事業者 | 製品 | ホームページ |
|---------------------|-------------------|---|--|--|
| 介護用ベッド | 1-(1) | パラマウントベッド株式会社 | 在宅用電動介護用ベッド「楽匠」 | http://www.paramount.co.jp/files/cms/notice/pdf/20130917_01_0.pdf |
| | 1-(2) | 株式会社ブラッツ | ●介護保険レンタル対応ベッド「ミオレット」 ●施設用低床電動ベッド「アルティレット」 | http://www.platz-ltd.co.jp/whatnew/pdf/3m-switch-recal2011-9-1.pdf |
| | 1-(3) | | 「ミオレット・フォーユー」 | http://www.platz-ltd.co.jp/whatnew/pdf/20130116recoll.pdf |
| ベッド用サイドレール ／グリップ | 2 | 医療・介護ベッド安全普及協議会 ① アイシン精機株式会社 ② シーホネンス株式会社 ③ パラマウントベッド株式会社 ④ 株式会社ブラッツ ⑤ フランスベッド株式会社 ⑥ 株式会社モルテン ⑦ 株式会社ランダルコーポレーション | ●医療・介護ベッド安全普及協議会の 会員7社のベッド用サイドレール、 及び手すり | http://www.bed-azen.org/ ① http://www.keepable.net/ ② http://www.seahonence.co.jp/for_safe/index.html ③ http://www.paramount.co.jp/files/cms/notice/pdf/20120629_01_0.pdf ④ http://www.platz-ltd.co.jp/support/safe/ ⑤ http://www.francebed.co.jp/anzentaisaku/notes-accident/index.html ⑥ http://www.molten.co.jp/health/product/bed/03.html ⑦ http://www.lundal.co.jp/products/archives/home/ |
| 手すり | 3 | 矢崎化工株式会社 | 「たちあつぷ」 | http://www.kaigo-web.info/oshirase/tachiappu/201204/index.html |
| ポータブルトイレ | 4 | 積水化学工業株式会社 | 「ポータブルトイレ座楽背もたれ型」 | http://www.sekisui.co.jp/notice/1238007_1969.html |
| 手指保護具(口腔用) | 5 | 株式会社オーラルケア | 「ゆびガード」 | http://www.oralcare.co.jp/Product/Detail/?product_id=000073&pcat=4 http://oralcare.ne.jp/medical/newyubi.pdf |
| 車いす | 6 | 株式会社幸和製作所 | 「アルミ製ミドル介助車」BH02 | http://www.tacaof.co.jp/about/apology.html |
| 歩行補助車 | 7 | アロン化成株式会社 | サンフィールⅡ サンフィールS サンフィール | http://www.aronkasei.co.jp/anjyu/s_oshirase.pdf |
| 電動車いす | 8-(1) | スズキ株式会社(製造・販売) | スズキ セニアカー ET-4A/ET-4C | http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2011/0905/index.html |
| | | パナソニックサイクルテック株式会社 (旧ナショナル自転車工業株式会社) | リラクルカート BH-RC41 | http://pct.panasonic.co.jp/info/RC41_3/ |
| | 8-(2) | スズキ株式会社 | 「スズキセニアカー」 (ET-4D/ET-4E/ET-4F/ET-4FS) | http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2008/0410/index.html |
| | | シーケー販売株式会社 | 「タウンパートナー」(EK40S・EK40D) | http://www.calsonic.jp/news/news_townpartner080410.html |
| | 8-(3) | 株式会社クボタ | 「ラクター」 | http://www.kubota.co.jp/cart/index.htm |
| | 8-(4) | | 「ラクロード」 | http://www.kubota.co.jp/kubotainfo/index5.html |
| | 8-(5) | トヨタ車体株式会社(旧アラコ株式会社) | 「エブリデー タイプ4」AT06L-PNBR | http://coms.toyotabody.jp/ |
| | 8-(6) | | 「エブリデー タイプ4」AT07L-PNDR | |
| 8-(7) | 「エブリデー」AT08L-PNCR | | | |
| 8-(8) | 「エブリデー」AK01E-P | | | |

| | | | | |
|--------|-------|-------------|-------------------------------------|--|
| マッサージ器 | 9-(1) | 株式会社の場電機製作所 | 「アルビシェイプアップローラー」 「シェイプアップローラーII」 | http://www.matoba.co.jp/index.html http://www.matoba.co.jp/health/info/使用中止のお願い.pdf |
| | 9-(2) | 株式会社フジ医療器 | 「もみ太くん」 「ハンディーマッサージャー(愛称:もみ太くん)」 | http://www.fujiiryoki.co.jp/company/news/news1/i013.html |

(別紙2)

関連機関・団体のホームページ (URL)

| 関連機関・団体 | ホームページ |
|------------------|---|
| 医療・介護ベッド安全普及協議会 | http://www.bed-anzen.org/ |
| 日本福祉用具・生活支援用具協議会 | http://www.jaspa.gr.jp/ |
| 一般社団法人日本福祉用具供給協会 | https://www.fukushiyogu.or.jp/index.php |
| 電動車いす安全普及協会 | http://www.den-ankyo.org/ |